


2026
версия 3.0

В
р
и
с
и

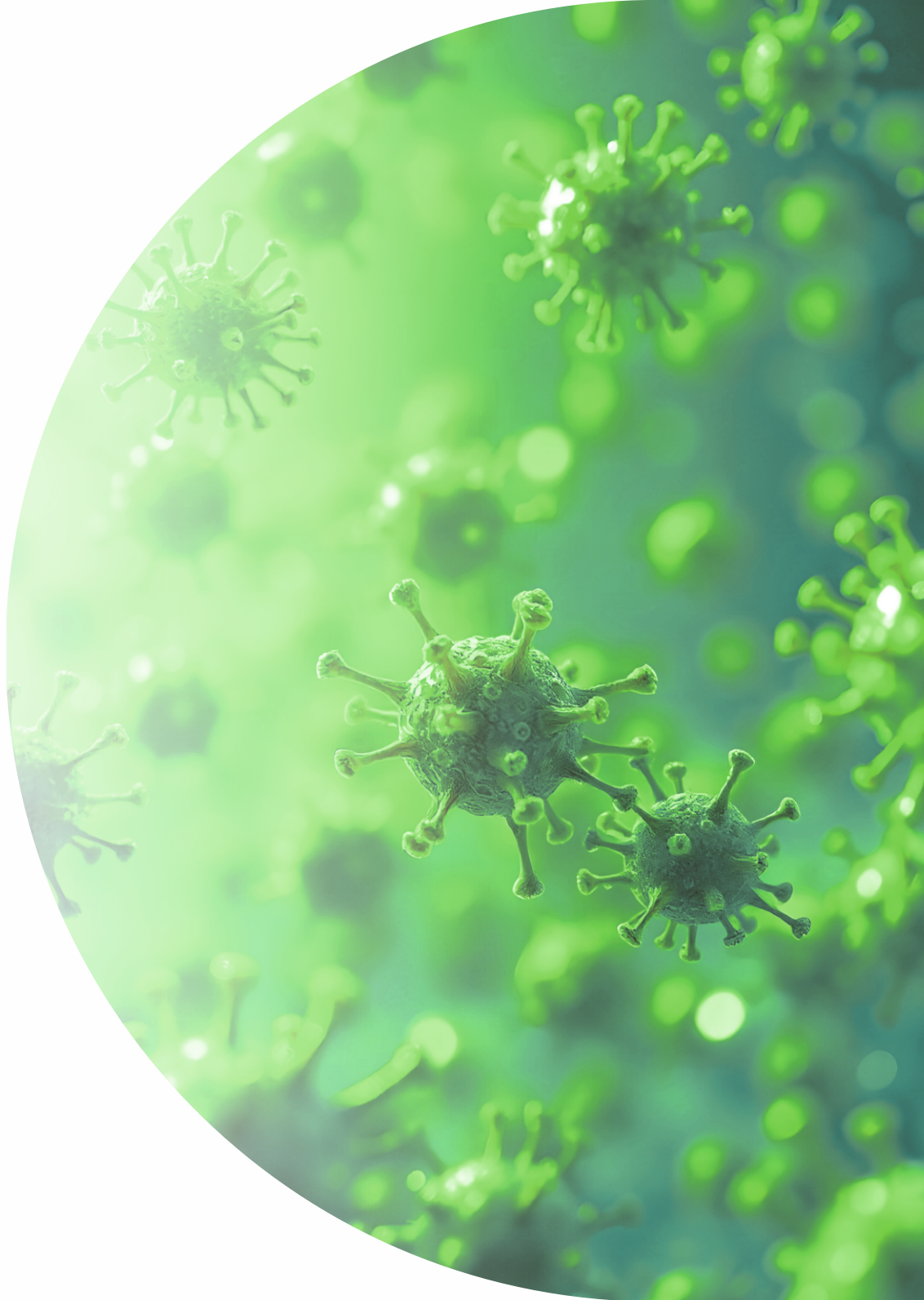

Острые респираторные инфекции

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Острые респираторные инфекции

Острые респираторные инфекции (ОРИ, ОРЗ) – группа заболеваний, которые вызываются множеством возбудителей, передаются воздушно-капельным путем и характеризуются острым поражением дыхательной системы человека. Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) входят в число ОРИ.

Статистика

В России число ежегодно болеющих ОРВИ и гриппом достигает более 30 млн человек, а ежегодный суммарный экономический ущерб от ОРВИ оценивается в 40 млрд рублей, составляя около 80% ущерба от всех инфекционных болезней. В среднем взрослый человек переносит от 2 до 4 простуд в течение года, ребенок болеет от 6 до 9 раз.



Вирусы

- Вирусы гриппа А и В;
- Респираторно-синцициальный вирус;
- Риновирус;
- Аденовирус;
- Коронавирус;
- Метапневмовирус;
- и другие.



Бактерии

- Стрептококк;
- Стафилококк;
- Хламидия;
- Клебсиелла;
- Легионелла;
- Микоплазма;
- Пневмококк;
- и другие.



Грибы

- Кандида;
- Криптококк;
- Аспергиллюс;
- Пневмоцисты;
- и другие.



Паразиты

- Аскариды;
- Метастронгилюсы;
- и другие.

Пути передачи ОРИ

Чаще всего инфицирование происходит воздушно-капельным, воздушно-пылевым и контактно-бытовым путями (при взаимодействии с заболевшим человеком, через полотенце, грязные руки, общую посуду).

Осложнения

ОРИ протекают в легкой, среднетяжелой и тяжелой формах, с развитием следующих осложнений:



Симптомы ОРВИ



Диагностика

Для определения возбудителя при ОРЗ используются различные методы, выбор которых зависит от конкретного клинического случая.

Иммунологические исследования (ИХА, ИФА, ИХЛА)

Это диагностические методы, основанные на выявлении антигенов возбудителей острых респираторных инфекций и антител, вырабатываемых в организме человека в ответ на инфицирование.

Полимеразная цепная реакция (ПЦР)

Высокоточный метод молекулярно-генетической диагностики, позволяющий добиться значительного увеличения малых концентраций определённых фрагментов ДНК возбудителя ОРЗ.

Культуральный метод

Применяется для выделения и идентификации чистой культуры возбудителя. Бактериологический посев проводится с целью дальнейшей культуральной и биохимической идентификации возбудителя, определения антибиотикочувствительности.

Профилактика



Вакцинация



Личная гигиена



ЗОЖ



Ношение масок



Проветривание

Грипп

Грипп - острая респираторная вирусная инфекция, вызванная вирусами гриппа типов А или В, протекающая с тяжелым токсикозом, лихорадкой, поражением верхних и нижних дыхательных путей.

Факторы, способствующие развитию тяжелой формы заболевания



Беременность



Возраст до 5 лет



Пожилой возраст



Хронические заболевания



Иммуносупрессия

Статистика

Ежегодно регистрируется около 1 миллиарда случаев сезонного гриппа, в том числе 3–5 миллионов случаев тяжелой формы заболевания. Каждый год от респираторных патологий, вызванных вирусами гриппа, умирают от 290 000 до 650 000 человек.

Симптомы

Свиной грипп H1N1 зачастую протекает под маской кишечной инфекции, особенно у детей, вызывая диарею, рвоту и обезвоживание.



Высокая температура



Головная боль



Боль в мышцах и суставах



Озноб



Кашель



Насморк

Осложнения

Менингит

Пневмония

Бронхит

Пиелонефрит

Синусит

Отит

Миозит

Перикардит

Гломерулонефрит

Энцефалит

Обезвоживание

Интересный факт

«Испанка» — это глобальная пандемия, вызванная вирусом гриппа А (H1N1), унесшая жизни примерно 100 миллионов человек на всей планете, что позволяет считать ее одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества.

COVID-19

Коронавирусная инфекция — это группа острых инфекционных заболеваний, вызываемых различными серотипами коронавирусов. Характеризуется синдромом общей инфекционной интоксикации и синдромом поражения респираторного тракта. COVID-19 - новая коронавирусная инфекция, вызываемая вирусом SARS-CoV-2.



Статистика

Начиная с декабря 2019 г. во всем мире было зарегистрировано более 760 млн случаев заболевания COVID-19, включая более 6,9 млн летальных исходов.

Формы заболевания коронавирусной инфекцией

1. Ковид-ОРВИ
2. Ковидная пневмония
3. Ковид-аносмия (потеря обоняния)
4. Гастроинтестинальный COVID-19 (кишечный ковид)
5. Нейроковид или церебральная форма
6. Бессимптомный COVID-19
7. Сочетанная форма

Осложнения

SARS-CoV-2 приводит к развитию целого спектра осложнений, которые сохраняются на протяжении длительного времени. Постковидный синдром затрагивает не только лёгкие, но и почки, желудочно-кишечный тракт, а также нервную и сердечно-сосудистую системы.


Интересный факт

80% пациентов сталкиваются с проявлениями постковидного синдрома. 5 самых распространённых симптомов: быстрая утомляемость, головные боли, нарушение внимания, выпадение волос, одышка.

РСВ-инфекция

Респираторно-синцитиальная инфекция – это вирусная инфекция, протекающая с преимущественным поражением нижних дыхательных путей.

РСВ по праву считается наиболее частой причиной инфекций дыхательной системы у детей до года.

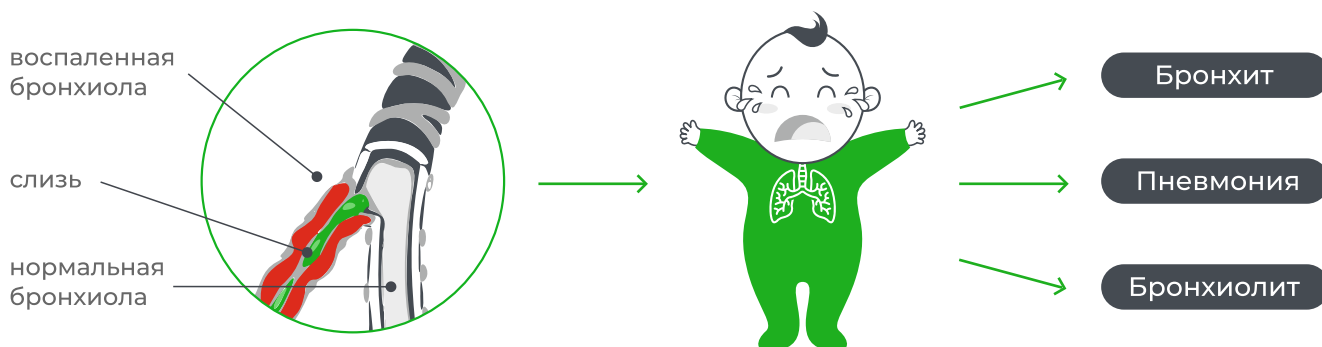

Симптомы



Кашель



Насморк



Одышка



Лихорадка



Озноб

Осложнения

Отит

Ложный круп

Острая дыхательная недостаточность

Отек легких

Статистика

По оценкам ВОЗ, во всём мире почти 34 млн новых случаев инфекции нижних дыхательных путей у детей младше 5 лет связаны с респираторно-синцитиальным вирусом. Он является причиной около 199 000 смертей в год.


РСВ является самой частой причиной детского бронхиолита и пневмонии, одной из основных причин госпитализации детей в первый год жизни.

Интересный факт

Перенесенный в раннем детстве бронхиолит, связанный с респираторно-синцитиальной инфекцией, является фактором риска развития бронхиальной астмы в будущем.

Аденовирус

Аденовирусная инфекция — это группа острых вирусных заболеваний, при которых возникает поражение слизистой оболочки дыхательных путей, глаз, кишечника и лимфоидных тканей.

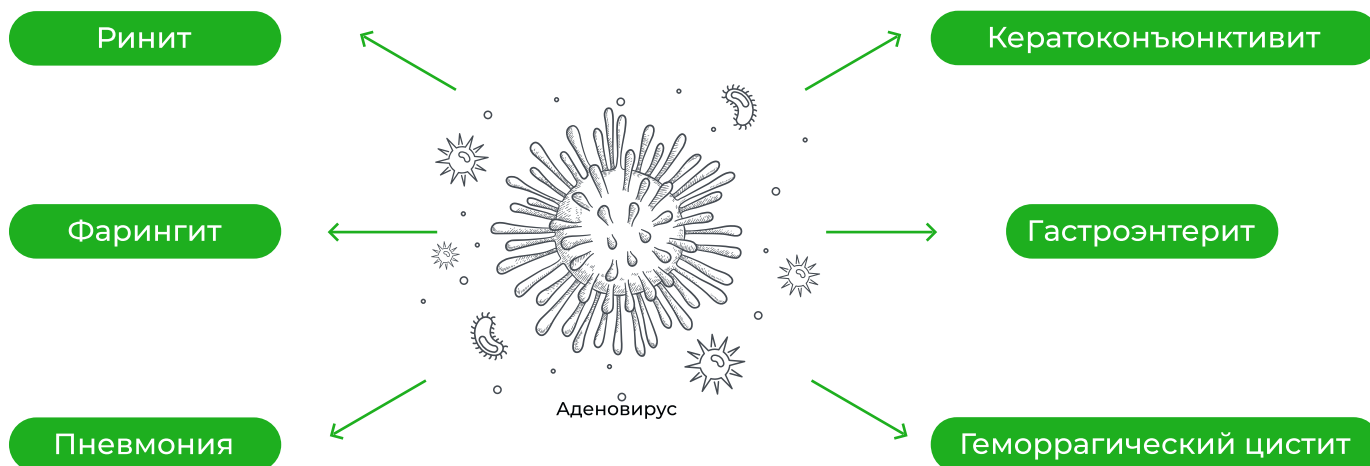

Статистика

По статистике, аденовирусные инфекции человека составляют 5–10% всех вирусных заболеваний. При этом большая часть поражений приходится на детский возраст (около 75%): 35–40% случаев регистрируют у детей до 5 лет, остальные — в возрасте до 14 лет.

Симптомы



Диарея



Рвота



Лихорадка



Сыпь



Признаки ОРВИ

Осложнения

Дыхательная недостаточность

Синусит

Гайморит

Отит

Поражение сердца


Поражение почек

Кишечная непроходимость

Научно доказано, что три серотипа аденовируса (12, 18, 31) обладают высокой онкогенностью

СГА-инфекция

Стрептококковая инфекция - группа болезней, вызываемых стрептококком группы А, преимущественно с воздушно-капельным путем передачи возбудителя, характеризующихся поражением верхних дыхательных путей и кожных покровов с развитием постстрептококковых аутоиммунных и токсико-септических осложнений.

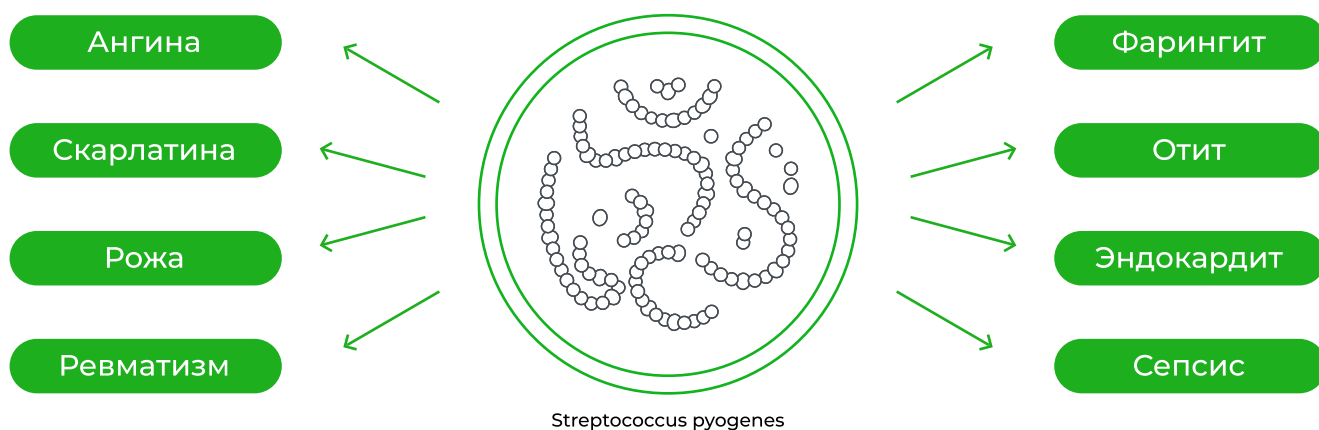

Статистика

По данным ВОЗ, в мире ежегодно возникают свыше 111 млн случаев стрептодермии и 616 млн случаев стрептококковых фарингитов. Тяжёлыми заболеваниями, вызванными СГА, страдает около 18 млн человек, из них 15,5 млн — ревматическими заболеваниями сердца.



Осложнения

Ревматическая лихорадка

Паратонзиллярный абсцесс миндалин


Постстрептококковый гломерулонефрит

Интересный факт

Каждый год в России около 10 миллионов детей и подростков заболевают острой респираторной стрептококковой инфекцией группы А.

Хламидийная пневмония

Пневмония хламидийного происхождения — это воспалительный процесс в области легких, который вызывают специфические внутриклеточные паразиты (*Chlamydia pneumoniae*). Эта пневмония относится к атипичным формам, имеет как легочные симптомы, так и проявления болезни со стороны других органов и систем.

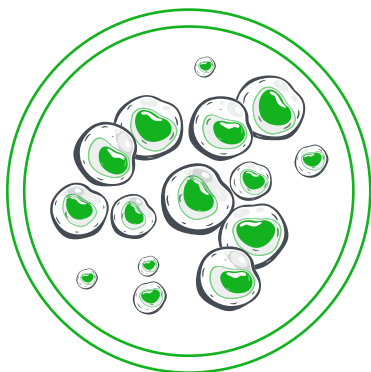

Попадая в организм человека, хламидии начинают активно размножаться в слизистой и уже через 10 часов внедряются в клетки и разрушают их.

Статистика

Согласно статистике, атипичную пневмонию выявляют в 7–30 % среди всех внебольничных пневмоний, но не всегда получается определить возбудителя, поэтому процент атипичных пневмоний на самом деле больше. *Chlamydia pneumoniae* вызывает от 5 до 15% пневмоний. В сезон ОРЗ эти показатели могут увеличиваться до 25%.

Симптомы

Chlamydia pneumoniae служит самым частым возбудителем респираторных хламидиозов (в том числе хламидийного фарингита, синусита, бронхита, пневмонии) у пациентов всех возрастов.

Осложнения


Течение хламидийной пневмонии затяжное. Мучительный кашель с болями в груди и недомогание могут сохраняться до нескольких месяцев. Из осложнений наиболее часты отиты, синуситы, реактивные артриты.

Наблюдения специалистов указывают на возможную этиологическую роль *Ch. pneumoniae* в развитии атеросклероза, саркоидоза легких, ишемического инсульта, болезни Альцгеймера. Поэтому перенесенная хламидийная пневмония может иметь далеко идущие последствия.



Легионеллез

Легионеллез - это тяжелое инфекционное заболевание, характеризующееся общей интоксикацией, поражением дыхательной, мочевыделительной и центральной нервной систем. Возбудителем является бактерия *Legionella pneumophila*.

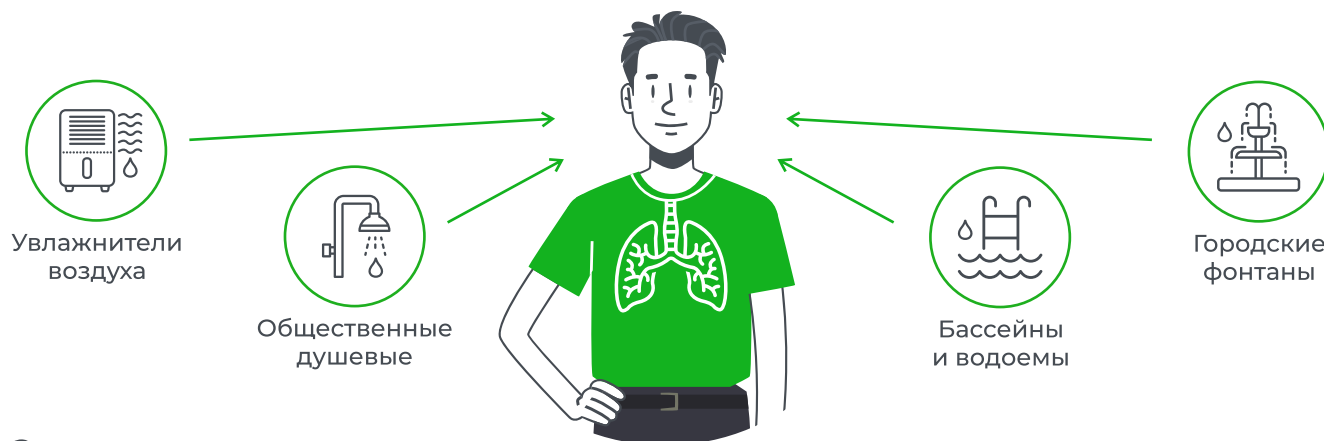


Заражение

Заражение легионеллёзом происходит при вдыхании паров или микроскопических капель (аэрозоля) заражённой жидкости. Более редкие случаи инфицирования — аспирация (попадание воды в лёгкие, если человек поперхнулся или неловко нырнул в бассейне).

Статистика

Точная статистика по заболеваемости отсутствует, так как во многих странах нет возможности правильно диагностировать заболевание. По данным ВОЗ, уровень смертности при легионеллезе составляет около 20%.

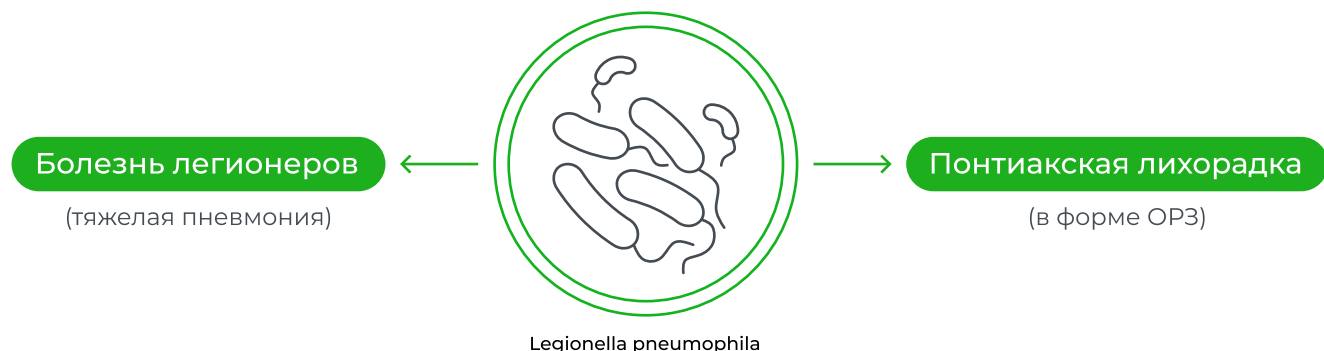

Осложнения

Наиболее частыми осложнениями легионеллеза являются легочная недостаточность, шок и полиорганная недостаточность, а также поражения головного мозга.

Интересный факт

Главная мера профилактики легионеллеза: своевременная замена фильтров в кондиционирующих устройствах и очищение вентиляционных систем. В системах кондиционирования создаются благоприятные условия для размножения легионелл, поэтому легионеллез часто называют болезнью кондиционеров.

ОРВИ-ИМБИАН-ИХА

Экспресс-тест предназначен для определения антигенов SARS-CoV-2, гриппа А, гриппа В, респираторно-синцициального вируса (RSV) и аденовируса в мазках из носоглотки с целью дифференциальной диагностики острых респираторных вирусных инфекций.

Преимущества экспресс-теста:

Чувствительность и специфичность 100%


5 вирусных инфекций в 1 тесте

Результат за 5 минут

Когда назначается исследование?

- При симптомах острой респираторной вирусной инфекции (внезапное начало болезни, лихорадка, боль в горле, боль в мышцах, головная боль, светобоязнь, сухой кашель, боль в грудной клетке, одышка, насморк).
- В целях дифференциальной диагностики вирусных и бактериальных острых респираторных заболеваний, определения показаний для назначения специфической противовирусной терапии.

Интерпретация положительного результата

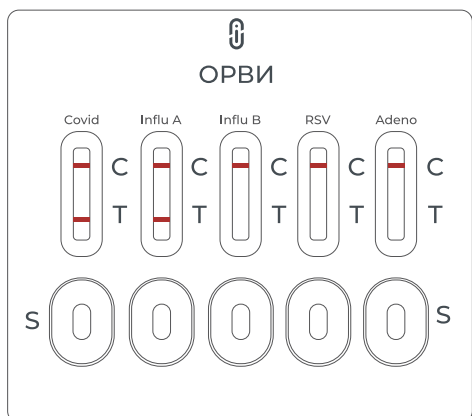

Положительный результат говорит о наличии в исследуемом образце SARS-CoV-2, гриппа А, гриппа В, респираторно-синцициального вируса (RSV) или аденовируса.

При появлении двух полосок в нескольких окошках, возможна микст-инфекция.

Если все окошки срегировали положительно, то, вероятно, тест выполнен неверно.



COVINFLUENZA-ИМБИАН-ИХА

Экспресс-тест предназначен для выявления нуклеокапсидного N антигена SARS-CoV-2 и антигенов гриппа типов А (включая подтипы H1N1 и H3N2) и В в мазках из носоглотки, ротоглотки и образцах слюны у лиц с клинической симптоматикой респираторного заболевания.

Преимущества экспресс-теста:

Чувствительность и специфичность 100%


3 вирусные инфекции в 1 тесте

Результат за 1 минуту

Когда назначается исследование?

- Для дифференциальной диагностики коронавирусной инфекции и гриппа.
- При симптомах острой респираторной вирусной инфекции (внезапное начало болезни, лихорадка, боль в горле, боль в мышцах, головная боль, светобоязнь, сухой кашель, боль в грудной клетке, одышка, насморк).

Интерпретация положительного результата

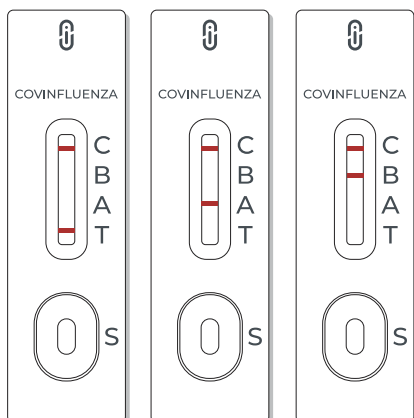

C+B - указывает на наличие в исследуемом образце гриппа В;

C+A - указывает на наличие в исследуемом образце вируса гриппа А;

C+T - Указывает на наличие в исследуемом образце SARS-CoV-2.

При появлении нескольких полосок, возможна микст-инфекция.

Если появились все полоски, то, вероятно, тест выполнен неверно.

COVID-19-ИМБИАН-ИХА и COVID-19 SELF-TEST

Экспресс-тест «COVID-19-ИМБИАН-ИХА» предназначен для выявления нуклеокапсидного антигена SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки, ротоглотки и образцах слюны у лиц с клинической симптоматикой респираторного заболевания.

Экспресс-тест «COVID-19 SELF-TEST» предназначен для выявления нуклеокапсидного антигена SARS-CoV-2 в мазках из нижнего носового хода на глубину 1,5–2,0 см или образцах слюны у лиц с клинической симптоматикой респираторного заболевания.

Преимущества экспресс-теста:

Чувствительность и специфичность 100%

Быстрое выявление в любом месте


Результат за 1 минуту



Когда назначается исследование?

- При симптомах острой респираторной вирусной инфекции (внезапное начало болезни, лихорадка, боль в горле, боль в мышцах, головная боль, светобоязнь, сухой кашель, боль в грудной клетке, одышка, насморк).
- При затяжном или тяжелом течении ОРВИ

Интерпретация положительного результата

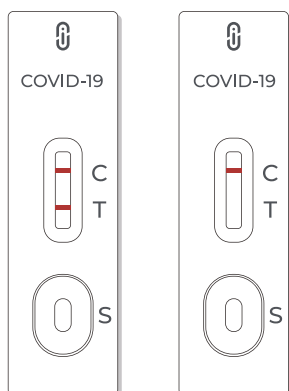

Указывает на наличие в исследуемом образце SARS-CoV-2

C+T - положительный результат

C - отрицательный результат

Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА + СВИНОЙ ГРИПП Н1Н1

Экспресс-тест предназначен для выявления антигенов вируса гриппа типов А, В, а также свиного гриппа Н1Н1 в назальных мазках, мазках из ротоглотки, образцах слюны и аспирате из носоглотки человека.

Преимущества экспресс-теста:

Чувствительность и специфичность 100%


Быстрое выявление гриппа в любом месте

Результат за 3 минуты

Когда назначается исследование?

- При симптомах острой респираторной вирусной инфекции (внезапное начало болезни, лихорадка, боль в горле, боль в мышцах, головная боль, светобоязнь, сухой кашель, боль в грудной клетке, одышка, насморк).
- При появлении симптомов острой кишечной инфекции.
- При затяжном или тяжелом течении ОРВИ.

Интерпретация положительного результата

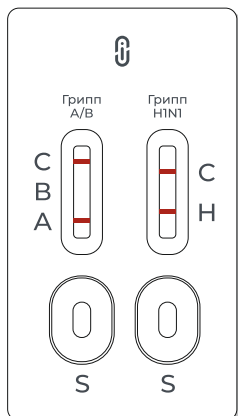

C+A - свидетельствует о наличии вируса гриппа А в исследуемом образце.

C+B - свидетельствует о наличии вируса гриппа В в исследуемом образце.

C+A+B - свидетельствует о наличии микст-инфекции в исследуемом образце.

C+H - наличие гриппа Н1Н1 в исследуемом образце.



RSV-ИМБИАН-ИХА

Экспресс-тест предназначен для определения респираторно-синцитиального вируса в респираторных выделениях (мазки из носа, носоглотки, ротоглотки) с целью выявления возбудителя острого бронхолита у детей и взрослых.

Преимущества экспресс-теста:

Чувствительность и специфичность 100%


Быстрое выявление в любом месте

Результат за 5 минут

Когда назначается исследование?

- При клинических проявлениях и подозрении на респираторно-синцитиальную вирусную инфекцию: слабость, головная боль, заложенность носа, боль и першение в горле, лихорадка, одышка, цианоз губ, акроцианоз, сухой или влажный приступообразный кашель.
- При дифференциальной диагностике с острыми респираторными вирусными заболеваниями, бронхитами, бронхолитами, пневмониями, вызванными другими возбудителями.
- При симптомах ОРВИ у детей, особенно в возрасте до 1 года.

Интерпретация положительного результата

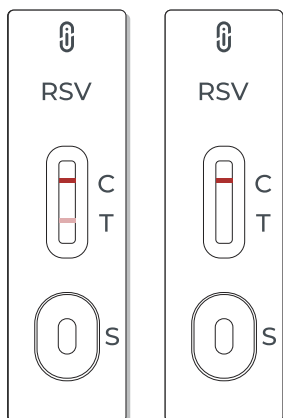

Указывает на наличие в исследуемом образце респираторно-синцитиального вируса

C+T - положительный результат.

C - отрицательный результат.



СтрептоА-ИМБИАН-ИХА

Экспресс-тест для определения β -гемолитического стрептококка группы А в образце мазка с миндалин, задней стенки глотки и всех воспаленных, язвенных или экссудативных зон с целью диагностики стрептококковой инфекции.

Преимущества экспресс-теста:

Чувствительность и специфичность 100%


Быстрое выявление в любом месте

Результат за 5 минут

Когда назначается исследование?

- При симптомах фарингита, тонзиллита, тонзиллофарингита и/или подозрении на развитие осложнений в результате инфицирования *S. pyogenes*.
- Для принятия решения о необходимости проведения антибактериальной терапии.

Интерпретация положительного результата

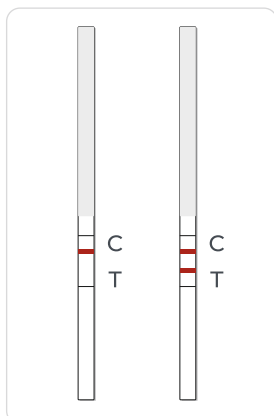

Свидетельствует о том, что в образце биоматериала присутствует β -гемолитический стрептококк группы А.

C+T - положительный результат.

C - отрицательный результат.



Legionella-ИМБИАН-ИХА

Экспресс-тест для определения антигена Legionella pneumophila в моче с целью первичной диагностики легионеллеза.

Преимущества экспресс-теста:

Чувствительность 100%

Специфичность 100%

Быстрая диагностика в любом месте


Результат за 10 минут



Когда назначается исследование?

- При подозрении на легионеллез (лихорадка Понтиак или легионеллезная пневмония);
- Пациентам с поражением легких при отсутствии эффекта от стандартного лечения;
- В случаях тяжелого течения пневмонии при наличии следующих факторов риска:
 - теплое время года;
 - возраст старше 40 лет;
 - путешествие внутри страны или за рубеж, совпадающее со сроком инкубационного периода (от 2 до 10 дней до начала заболевания);
 - наличие сопутствующих заболеваний (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания);
- Гормональная или интенсивная иммуносупрессивная терапии.

Интерпретация положительного результата

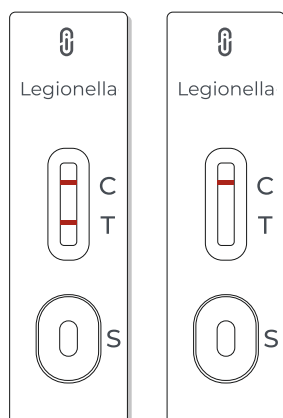

Указывает на наличие в исследуемом образце Legionella pneumophila

C+T - положительный результат.

C - отрицательный результат.

Chlamydia pneumoniae МС-ИМБИАН-ИХА

Экспресс-тест для определения антител IgM и IgG к Chlamydia pneumoniae в сыворотке, плазме и цельной крови с целью вспомогательной диагностики хламидийной пневмонии.

Преимущества экспресс-теста:

Чувствительность 100%

Специфичность 100%

Быстрое выявление в любом месте


Результат за 5 минут



Когда назначается исследование?

- При клинических проявлениях и подозрении на пневмонию: слабость, головная боль, лихорадка, одышка, цианоз губ, сухой или влажный приступообразный кашель, боль в груди.
- При атипичном воспалении легких для выявления возбудителя.
- При пневмонии, устойчивой к антибиотикотерапии.
- При персистирующих инфекциях верхних дыхательных путей.

Интерпретация положительного результата

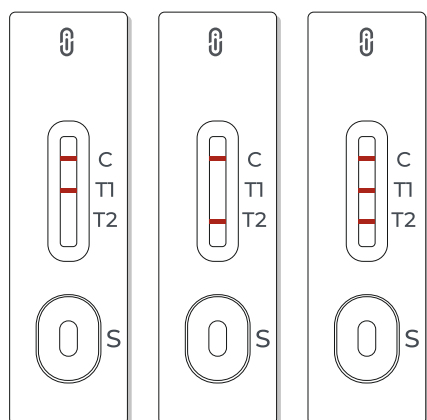


C+T1 - выявлены антитела IgG к Chlamydia pneumoniae, что может говорить о перенесенной инфекции;

C+T2 - антитела IgM к Chlamydia pneumoniae, что может говорить об активной форме инфекции;



C+T1+T2 - антитела IgM и IgG к Chlamydia pneumoniae, что также может говорить об активной форме инфекции.

Состав наборов

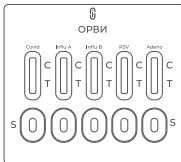
ОРВИ-ИМБИАН-ИХА					
Регистрационное удостоверение (РУ)	Номер комплекта	Каталожный номер	Кол-во опред.	Описание комплекта	Тест-кассета
РЗН 2023/21180	1	iKR-003/1 (пачка)	1	Тест-кассета; Буферный раствор; Тампон-зонд МиниМед стерильный; Инструкция по применению.	
	2	iKR-003/25 (шоу-бокс)	25		

COVINFLUENZA-ИМБИАН-ИХА						
Регистрационное удостоверение (РУ)	Номер комплекта	Каталожный номер	Кол-во опред.	Описание комплекта	Тестовое устройство	
РЗН 2024/22600	1	iKR-004/1.1 (пачка)	1	Тест-кассета; Буферный раствор; Тампон-зонд МиниМед стерильный; Инструкция по применению.		
	2	iKR-004/1.2 (пакет)	1			
	3	iKR-004/20.3 (шоу-бокс)	20	Тест-кассета; Буферный раствор; Тампон-зонд МиниМед стерильный; Ложемент; Инструкция по применению.		
	4	iKR-004/20.4 (шоу-бокс)	20	Тест-полоска; Буферный раствор; Тампон-зонд МиниМед стерильный; Ложемент; Инструкция по применению.		
	5	iKR-004/25.5 (шоу-бокс)	25	Тест-кассета; Буферный раствор; Тампон-зонд МиниМед стерильный; Инструкция по применению.		
	6	iKR-004/25.6 (шоу-бокс)	25	Тест-кассета; Буферный раствор; Тампон-зонд МиниМед стерильный; Ложемент; Инструкция по применению.		

Состав наборов

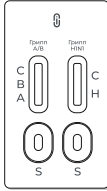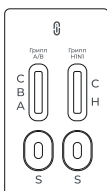Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА					
Регистрационное удостоверение (РУ)	Номер комплекта	Каталожный номер	Кол-во опред.	Описание комплекта	Тест-кассета
РЗН 2023/20730	1	KR-016/1.1 (пачка)	1	Тест-кассета; Буферный раствор; Тампон-зонд МиниМед стерильный; Инструкция по применению.	
	2	KR-016/1.2 (пачка)	1	Тест-кассета; Буферный раствор; Тампон-зонд МиниМед стерильный; Инструкция по применению.	
	3	KR-016/10.3 (шоу-бокс)	10	Тест-кассета; Буферный раствор; Тампон-зонд МиниМед стерильный; Инструкция по применению.	
	4	KR-016/20.4 (шоу-бокс)	20		
	5	KR-016/20.5 (пакет)	20	Тест-полоска А/В; Тест-полоска H1N1; Буферный раствор Пробирка; Тампон-зонд МиниМед стерильный; Ложемент; Инструкция по применению.	
	7	KR-016/25.7 (шоу-бокс)	25		
	8	KR-016/25.8 (пакет)	25		
	6	KR-016/25.6 (шоу-бокс)	25	Тест-кассета; Буферный раствор; Тампон-зонд МиниМед стерильный; Контрольные образцы K _A (+); K _B (+); K(-); Инструкция по применению.	
	9	KR-016/25.9 (шоу-бокс)	25	Тест-кассета; Буферный раствор; Пробирка; Пипетка Пастера; Тампон-зонд МиниМед стерильный; Ложемент; Инструкция по применению.	
	10	KR-016/100.10 (шоу-бокс)	100	Тест-кассета; Буферный раствор; Тампон-зонд МиниМед стерильный; Инструкция по применению.	

Состав наборов

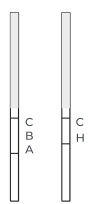Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА					
Регистрационное удостоверение (РУ)	Номер комплекта	Каталожный номер	Кол-во опред.	Описание комплекта	Тест-кассета
РЗН 2023/20730	11	KR-016/100.11 (шоу-бокс)	100	Тест-полоска А/В; Тест-полоска H1N1; Буферный раствор; Пробирка; Тампон-зонд МиниМед стерильный; Ложемент; Инструкция по применению.	
	12	KR-016/20.12 (шоу-бокс)	20	Тест-кассета; Буферный раствор; Пробирка-капельница; Тампон-зонд МиниМед стерильный; Ложемент; Инструкция по применению.	

COVID-19-ИМБИАН-ИХА					
Регистрационное удостоверение (РУ)	Номер комплекта	Каталожный номер	Кол-во опред.	Описание комплекта	Тест-кассета
РУ РЗН 2025/24762	1	iKR-013/20.1	20	Тест-кассета; Буферный раствор; Тампон-зонд; Ложемент; Инструкция по применению.	
	2	iKR-013/20.2	20	Тест-кассета; Буферный раствор; Пробирка; Тампон-зонд; Ложемент; Инструкция по применению.	
	3	iKR-013/25.3	25	Тест-кассета; Буферный раствор; Тампон-зонд; Ложемент; Инструкция по применению.	
	4	iKR-013/25.4	25	Тест-кассета; Буферный раствор; Пробирка; Тампон-зонд; Ложемент; Инструкция по применению.	
	5	iKR-013/25.5	25	Тест-кассета; Буферный раствор; Контрольные образцы; Тампон-зонд; Перчатки; Ложемент; Инструкция по применению.	

Состав наборов

COVID-19 SELF-TEST					
Регистрационное удостоверение (РУ)	Номер комплекта	Каталожный номер	Кол-во опред.	Описание комплекта	Тест-кассета
РУ РЗН 2025/25252	1	iKR-009/1.1	1	Тест-кассета; Буферный раствор; Тампон-зонд; Инструкция по применению.	
	2	iKR-009/20.2	20	Тест-кассета; Буферный раствор; Тампон-зонд; Ложемент; Инструкция по применению.	
	3	iKR-009/25.3	25	Тест-кассета; Буферный раствор; Тампон-зонд; Ложемент; Инструкция по применению.	

RSV-ИМБИАН-ИХА					
Регистрационное удостоверение (РУ)	Номер комплекта	Каталожный номер	Кол-во опред.	Описание комплекта	Тестовое устройство
РЗН 2023/21188	1	iKR-002/1.1 (пачка)	1	Тест-полоска; Буферный раствор; Тампон-зонд МиниМед стерильный; Инструкция по применению.	
	2	iKR-002/25.2 (шоу-бокс)	25		
	3	iKR-002/1.3 (пачка)	1	Тест-кассета; Буферный раствор; Тампон-зонд МиниМед стерильный; Инструкция по применению.	
	4	iKR-002/25.4 (шоу-бокс)	25		

Legionella-ИМБИАН-ИХА					
Регистрационное удостоверение (РУ)	Номер комплекта	Каталожный номер	Кол-во опред.	Описание комплекта	Тест-кассета
РЗН 2023/21362	1	iKR-005/12.1 (шоу-бокс)	12	Тест-кассета; Пипетки для переноса жидкостей (Пастера); Положительный контрольный образец; Отрицательный контрольный образец; Инструкция по применению.	
	2	iKR-005/22.2 (шоу-бокс)	22		

Состав наборов

СтрептоА-ИМБИАН-ИХА					
Регистрационное удостоверение (РУ)	Номер комплекта	Каталожный номер	Кол-во опред.	Описание комплекта	Тест-полоска
РЗН 2023/20478	1	KR-018/2.1 (пачка)	2	Тест-полоска;	
	2	KR-018/5.2 (шоу-бокс)	5	Зонд-тампон стерильный; Экстракционная пробирка; Шпатель медицинский деревянный стерильный; Флакон-капельница с реагентом А; Флакон-капельница с реагентом В; Инструкция по применению.	
	3	KR-018/20.3 (шоу-бокс)	20	Тест-полоска;	
	4	KR-018/25.4 (шоу-бокс)	25	Зонд-тампон стерильный; Экстракционная пробирка; Шпатель медицинский деревянный стерильный; Флакон-капельница с реагентом А; Флакон-капельница с реагентом В; Контроль +, инактивированный; Контроль -, инактивированный; Подставка под экстракционные пробирки; Инструкция по применению.	
	5	KR-018/50.5 (шоу-бокс)	50		

Chlamydia pneumoniae MG-ИМБИАН-ИХА					
Регистрационное удостоверение (РУ)	Номер комплекта	Каталожный номер	Кол-во опред.	Описание комплекта	Тест-кассета
РЗН 2024/22122	1	iKR-010/1.1 (пачка)	1	Тест-кассета; Буферный раствор; Пипетки для переноса жидкостей (Пастера); Ланцеты одноразовые; Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая; Инструкция по применению.	
	2	iKR-010/25.2 (шоу-бокс)	25	Тест-кассета; Буферный раствор; Инструкция по применению.	

Интересный факт

Вирусы не боятся мороза. При нулевой температуре вирус может существовать до месяца. Именно поэтому на период весенней оттепели часто приходится вспышки заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Наш ассортимент экспресс-тестов

ИНФЕКЦИИ РЕСПИРАТОРНОГО ТРАКТА

Грипп A/B + свиной грипп H1N1
RSV
COVID-19 (антиген)
COVID-19 + грипп A, B
ОРВИ (5 в 1)
Стрептококк А
COVID-19 (антитела)
RSV + грипп A/B
Анти-MTGAM (M. tuberculosis)
Chlamydia pneumoniae
Legionella pneumophila

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖКТ

Норовирус
Энтеровирус
Ротавирус
Рота/аденовирус (2 в 1)
Рота/Адено/Астровирус (3 в 1)
Clostridium difficile (3 в 1)
Clostridium difficile Toxin A
Clostridium difficile Toxin B
Helicobacter pylori
Escherichia coli O157:H7
Панкреатическая эластаза-1
Трипсиноген-2
Кальпротектин
Лактоферрин
Трансферрин
Salmonella typhi
Hb/Tf/Calp (B3K)
Аденовирус

ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

Treponema pallidum
Trichomonas vaginalis
Neisseria gonorrhoeae
Chlamydia trachomatis

КАРДИОМАРКЕРЫ

Тропонин I
Тропонин T
Миоглобин
Креатинкиназа MB
Тропонин I/Креатинкиназа MB/Миоглобин
БСЖК
NT-proBNP
С-реактивный белок
D-димер

TORCH И ГЕРПЕСВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ

TORCH-инфекции (5 в 1)
Rubella virus
Toxoplasma gondii

ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ

Гепатит А
Гепатит В
Гепатит С
HBsAg/антиHCV (2 в 1)

ГЕЛЬМИНТОЗЫ И ЗООНОЗНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Giardia lamblia
Brucella
Cryptosporidium parvum
Tularensis francisella
Leptospira interrogans

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЕЕ МОНИТОРИНГ

ПАМГ-1
БСИФР-1 + АФП
Фетальный фибронектин
ХГЧ
ХГЧ (полуколич.)
Цифровой ХГЧ
ЛГ
ФСГ
Стрептококк В
рН-баланс
Ферритин

ВИРУС ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА

ВИЧ (антитела + антиген)
ВИЧ (антитела)

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

Альбумин

ГОРМОНЫ

ТТГ
Пролактин

АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКА

Иммуноглобулин Е

ВИТАМИНЫ

Витамин D
Витамин С

ОНКОМАРКЕРЫ

FOB
РЭА
PSA
АФП
CA-125
BCA/НВ (2 в 1)

УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Candida albicans

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Прокальцитонин (цветовая шкала)
Прокальцитонин
Альфа-дефензин

ПРОЧЕЕ

CARBA5
Алкотест
УриPRO (белок)
Уритест (показатели мочи)
УриGLU (глюкоза в моче)
УРИ: GLU+KET (глюкоза и кетоны)
GLU (глюкоза в крови)
Анти-ТТГ (целиакия)

АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Артрит



С более подробной информацией
об экспресс-тестах можно ознакомиться
на сайте нашей компании:

 [ОРВИ-ИМБИАН-ИХА](#)

 [COVINFLUENZA-ИМБИАН-ИХА](#)

 [ГРИПП А/В-ИМБИАН-ИХА+H1N1](#)

 [RSV-ИМБИАН-ИХА](#)

 [COVID-19 SELF-TEST](#)

 [СТРЕПТОА-ИМБИАН-ИХА](#)

 [CHLAMYDIA-PNEUMONIAE-MG-ИМБИАН-ИХА](#)

 [LEGIONELLA-ИМБИАН-ИХА](#)

 [COVID-19-ИМБИАН-ИХА](#)

www.imbian.ru

8-800-600-90-77

info@imbian.ru