

Инструкция по запуску CFX Грипп-АН1pdm09+В+SARS-CoV-2-ИМБИАН-ПЦР с помощью файла с готовыми параметрами

- 1) Запустить файл «Протокол CFX Грипп-АН1pdm09+В+SARS-CoV-2-ИМБИАН-ПЦР» двойным нажатием левой кнопкой мыши.
- 2) Нажать кнопку «ОК»
- 3) В открывшемся окне нажать кнопку «Next» («Дальше»)
- 4) В открывшемся окне нажать кнопку «Select Existing...» («Выбрать существующий...»)
- 5) Выбрать файл «Планшет CFX Грипп-АН1pdm09+В+SARS-CoV-2-ИМБИАН-ПЦР» и нажать кнопку «Открыть»
- 6) Нажать кнопку «Edit Selected...»
- 7) В открывшемся окне расставить и прописать пробы на матрице планшета. Позиции, которые не соответствуют никаким пробам необходимо выделить и нажать кнопку «Clear Wells» («Очистить лунки»)
- 8) Нажать кнопку «ОК»
- 9) В открывшемся диалоговом окне нажать кнопку «Да»
Внимание! При следующем запуске, при выполнении пункта 5 откроется матрица планшета с последнего запуска. Если необходимо сохранить первоначальную матрицу, то дублируйте ее перед каждым запуском, и при запуске откройте дубль.
- 10) Нажмите кнопку «Next» («Дальше»)
- 11) Загрузите пробы в прибор и нажмите кнопку «Next» («Дальше»)
- 12) Укажите путь сохранения результатов амплификации.